



VAH & IHO



DESOSurFIX®

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- Begrenzt viruzid PLUS innerhalb 3 Min.
- Geeignet für den Einsatz in Vliestuchspendersystemen
- Sehr gute Materialverträglichkeit



Produktbeschreibung

DESOSurFIX ist ein alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel für die schonende Reinigung und Desinfektion kleiner, mittlerer und größerer Flächen. Mit seinem umfassenden Wirkspektrum eignet sich das gebrauchsfertige Flächendesinfektionsmittel für die Routine ebenso wie für die gezielte Desinfektion und bei Ausbrüchen, z. B. mit Noroviren. **DESOSurFIX** ist farbstoff- und parfümfrei, hinterlässt keine Streifen oder sichtbaren Rückstände und ist somit für den Einsatz im Lebensmittelbereich zu empfehlen. Das Produkt wird im Sprüh-Wischverfahren oder im Sprühverfahren (nur in Ausnahmefällen, z. B. bei schwer zugänglichen Flächen) auf die zu desinfizierende Fläche aufgebracht. Anwendervorteile bietet auch der Einsatz in Kombination mit dem D-WIPES-Vliestuchspendersystem. Die hohe Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Flächen rundet das Leistungsspektrum des flüssigen Flächendesinfektionsmittels ab.

Anwendungsempfehlungen			30 s	1 min	2 min	3 min
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH / EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung			•	
	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung		•		
tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	•			
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung		•		
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung				•
	EN 16777	niedrige Belastung				•
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 16777	niedrige Belastung		•		
Ergänzende Prüfergebnisse						
bakterizid	EN 16615	hohe Belastung			•	
	EN 13697	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 13727	hohe Belastung		•		
	EN 1276	hohe Belastung		•		
levurozid	EN 16615	hohe Belastung			•	
	EN 13697	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 13624	hohe Belastung		•		
	EN 1650	hohe Belastung		•		
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/HCV	•			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung				•
	EN 16777	niedrige Belastung				•
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	hohe und niedrige Belastung		•		
	EN 16777	niedrige Belastung				•
wirksam gegen Vacciniaviren	EN 14476	hohe und niedrige Belastung	•			
	EN 16777	niedrige Belastung		•		

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

DE 08/2021



DESosurFIX

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Anwendung

Zur vollständigen Benetzung die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

DESosurFIX kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation verwendet werden. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, da HACCP konform.

Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil in 100 g Lösung: 45 g Ethanol; Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): Enthält < 5 % nichtionische Tenside.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung von **DESosurFIX** wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA) und Aluminium

Die Anwendung von **DESosurFIX** ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Messing und Polyethylene terephthalat (PET)

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gem. nationaler Richtlinien.

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	GVS-Art.-Nr.
DESosurFIX	Flasche	20 x 500 ml	500 ml	4-13-005	45700010
	Triggerflasche	6 x 750 ml	750 ml	4-13-0075	45700007
	Flasche	10 x 1000 ml	1000 ml	4-13-010	45700008
	Kanister	3 x 5 Liter	5 Liter	4-13-050	45700005

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die GVS-Art.-Nr. beziehen sich jeweils auf Einzelgebinde.

CE 0482

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

